

Instrukce pro použití předplněného pera SensoReady přípravku Cosentyx 150 mg



Pero SensoReady přípravku Cosentyx 150 mg

Injekční roztok v předplněném peru

Secukinumabum

Návod k použití pro pacienty




Přečtěte si VŠECHNY následující instrukce před podáním injekce.

Tyto instrukce Vám pomohou správně injikovat s použitím pera Cosentyx SensoReady.

Je důležité, nesnažit se o podání injekce sám (sama) nebo opatrované osobě, dokud nebudete proškolen(a) Vaším lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Vaše pero SensoReady přípravku Cosentyx 150 mg:

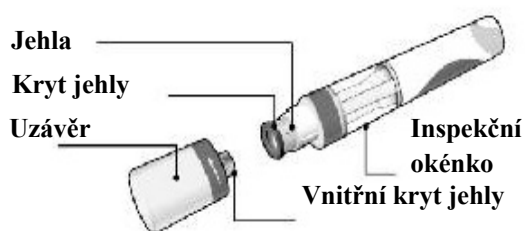

Pero SensoReady přípravku Cosentyx 150 mg znázorněné se sejmutým uzávěrem. **Nesnímejte** uzávěr, dokud nejste připraven(a) k injekci.

Uchovávejte pero v krabici v **chladničce** při teplotě 2 °C až 8 °C a **mimo dosah dětí**.

- **Chraňte** pero **před mrazem**.
- **Netřeste** perem.
- Nepoužívejte pero, pokud Vám **vypadlo** se sejmutým krytem.

Pro komfortnější injekci, vyjměte pero z chladničky **15-30 minut před injekcí**, aby dosáhlo pokojové teploty.

Co potřebujete pro injekci:


Obsaženo v balení:

Nové a nepoužité pero SensoReady přípravku Cosentyx 150 mg (pro dávku 150 mg je zapotřebí 1 pero a pro dávku 300 mg jsou zapotřebí 2 pera).



Neobsaženo v balení:


- Alkoholový tampón.
- Smotek vaty nebo gázy.
- Nádobka na ostré předměty.

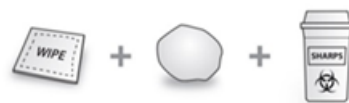

Před injekcí:

1. Důležitá bezpečnostní kontrola před injekcí:

Tekutina musí být čirá. Její barva může být od bezbarvé do mírně nažloutlé.

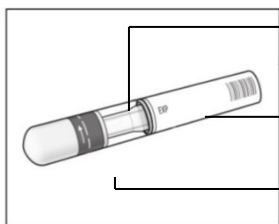


Nepoužívejte, pokud tekutina obsahuje zřetelně viditelné částice, je zakalená nebo zřetelně hnědá. Můžete vidět malé bublinky vzduchu, což je normální.

Nepoužívejte pero po uplynutí **doby použitelnosti**.


Nepoužívejte, pokud byla porušena **pečet**.

Poradte se s lékárníkem, pokud pero nevyhoví některé z těchto kontrol.

2a. Zvolte místo injekce:

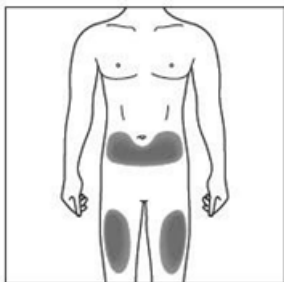

- Doporučené místo je přední část Vašich stehen. Můžete též použít podbříšek, **nikoliv** však oblast 5 centimetrů okolo pupku.
- Při samopodávání injekce zvolte vždy jiné místo injekce.
- Neinjikujte do oblastí, kde je pokožka jemná, s podlitinami, zarudlá, odlupuje se nebo je tvrdá. Vyvarujte se oblastí s jizvami nebo vytahanou pokožkou.

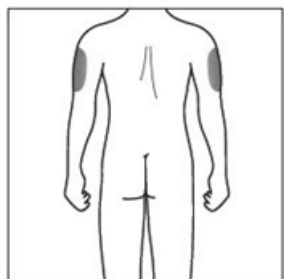

2b. Pouze opatrovníci a zdravotničtí pracovníci:


- Pokud Vám podává injekci **opatrovník** nebo **zdravotnický pracovník**, lze též použít vnější stranu paží.



3. Očištění místa injekce:

- Umyjte si ruce mýdlem a horkou vodou.
- Krouživým pohybem očištěte místo injekce alkoholovým tampónem. Před injekcí nechte místo vyschnout.
- Před injekcí se nedotýkejte očištěného místa.

Injekce:

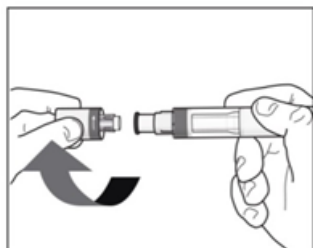

4. Sejmутí uzávěru:

- Uzávěr sejměte teprve tehdy, pokud jste připraven(a) použít pero.
- Odšroubujte uzávěr ve směru šipky.
- Po sejmутí odhodte uzávěr do odpadu. **Nesnažte se uzávěr znovu nasadit.**
- Pero použijte během 5 minut od sejmутí uzávěru.



5. Držte pero:

- Držte pero pod úhlem 90 stupňů nad očištěným místem injekce.



Správně



Nesprávně




PŘEČTĚTE SI PŘED PODÁNÍM INJEKCE.

Během injekce uslyšíte **2 hlasitá cvaknutí**.


První cvaknutí znamená, že injekce začala. O několik vteřin později **druhé cvaknutí** znamená, že injekce je **téměř** podána.

Musíte držet pero pevně proti pokožce, dokud neuvidíte, že **zelený indikátor** vyplnil okénko a přestal se pohybovat.

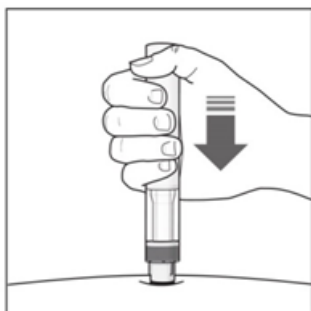

6. Zahájení injekce:

- Přitiskněte pero pevně proti pokožce, abyste zahájil(a) injekci.
- **První cvaknutí** znamená, že injekce začala.
- **Držte stále** pero pevně proti pokožce.
- **Zelený indikátor** ukazuje postup injekce.

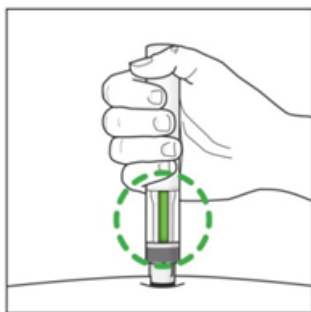

7. Ukončení injekce:


- Uslyšíte **druhé cvaknutí**. To znamená, že injekce je **téměř** podána.
- Zkontrolujte, zda **zelený indikátor** vyplnil okénko a přestal se pohybovat.
- Pero lze nyní vyjmout.

Po injekci:



8. Zkontrolujte, zda zelený indikátor vyplnil okénko:

- To znamená, že přípravek byl podán. Pokud zelený indikátor není vidět, obraťte se na lékaře.
- Na místě injekce se může objevit malé množství krve. Můžete na místo injekce přitisknout smotek vaty nebo gázu a podržte 10 vteřin. Místa injekce se nedotýkejte. Pokud je to zapotřebí, můžete místo injekce překrýt malou adhezivní náplastí.

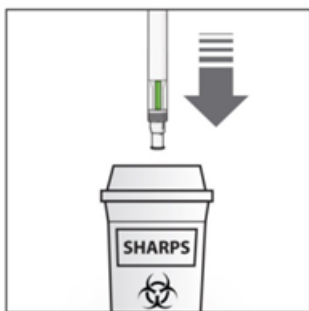

9. Odstranění pera SensoReady přípravku Cosentyx 150 mg:

- Odložte použité pero do nádoby na ostrý odpad (tj. proti propíchnutí odolná uzavíratelná schránka nebo podobná)
- Pero se nikdy nesnažte opakovaně použít.