

Instrukce pro použití předplněného pera UnoReady přípravku Cosentyx 300 mg secukinumabum




Přečtěte si VŠECHNY následující instrukce před podáním injekce.

Tyto instrukce Vám pomohou správně injikovat s použitím pera Cosentyx UnoReady.

Je důležité, nesnažit se o podání injekce sám (sama), dokud nebudete proškolen(a) Vaším lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Vaše pero Cosentyx UnoReady 300 mg:

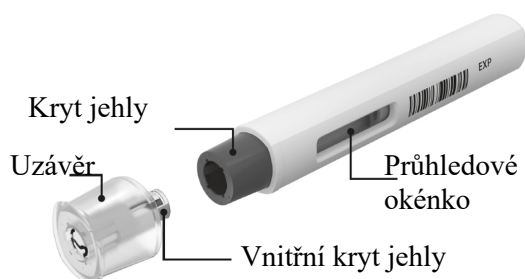

Pero Cosentyx UnoReady 300 mg znázorněné se sejmutým uzávěrem.

Nesnímejte uzávěr, dokud nejste připraven(a) k injekci.

Nepoužívejte pero Cosentyx UnoReady, pokud je pečeť na krabici porušená.

Uchovávejte pero Cosentyx UnoReady v uzavřené vnější krabici, dokud nebudete připraven(a) jej použít, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte pero Cosentyx UnoReady v **chladničce** při teplotě 2 °C až 8 °C a **mimo dosah dětí**.


- **Chraňte** pero **před mrazem**.
- **Netřeste** perem.
- Nepoužívejte pero, pokud Vám **vypadlo** se sejmutým krytem.

Jehla je zakryta krytem jehly a není vidět. Nedotýkejte se krytu jehly ani na něj netlačte, mohlo by dojít ke zranění jehlou.

Co potřebujete pro injekci:

Obsaženo v balení:

Nové a nepoužité pero Cosentyx UnoReady 300 mg.

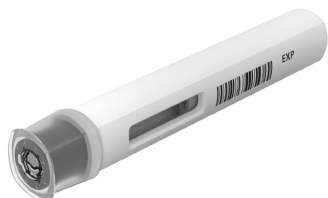

Neobsaženo v balení:


- Alkoholový tampón.
- Smotek vaty nebo gázy.
- Nádobka na ostré předměty.



Před injekcí:

Vyjměte pero Cosentyx UnoReady 300 mg z chladničky 30 až 45 minut před injekcí, aby dosáhlo

pokožkové teploty.

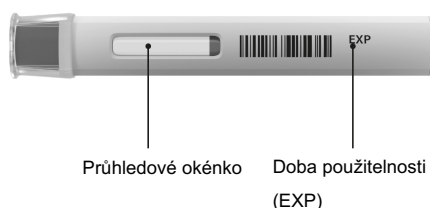

1. Důležitá bezpečnostní kontrola před injekcí:

Pro “průhledové okénko”:

Tekutina musí být čirá. Její barva může být od bezbarvé do mírně nažloutlé.



Nepoužívejte, pokud tekutina obsahuje zřetelně viditelné částice, je zakalená nebo zřetelně hnědá. Můžete vidět malé bublinky vzduchu, což je normální.

Pro “dobu použitelnosti”:

Zkontrolujte dobu použitelnosti (EXP) na Vašem peru Cosentyx UnoReady. **Nepoužívejte** pero po uplynutí **doby použitelnosti**.

Zkontrolujte, zda pero obsahuje správný lék a dávku.

Poradte se s lékárníkem, pokud pero nevyhoví některé z těchto kontrol.

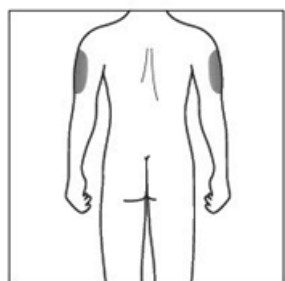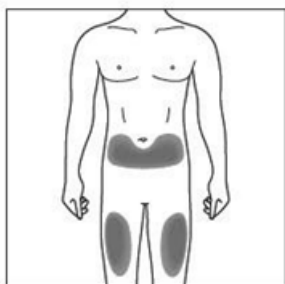

2a. Zvolte místo injekce:

- Doporučené místo je přední část Vašich stehen. Můžete též použít podbříšek, **nikoliv** však oblast 5 centimetrů okolo pupku.
- Při samopodávání injekce zvolte vždy jiné místo injekce.
- Neinjikujte do oblastí, kde je pokožka jemná, s podlitinami, zarudlá, odlupuje se nebo je tvrdá. Vyvarujte se oblastí s jizvami nebo vytahanou pokožkou.


2b. Pouze opatrovníci a zdravotničtí pracovníci:

- Pokud Vám podává injekci **opatrovník** nebo **zdravotnický pracovník**, lze též použít vnější stranu paží.

3. Očištění místa injekce:


- Umyjte si ruce mýdlem a horkou vodou.
- Krouživým pohybem očistěte místo injekce alkoholovým tampónem. Před injekcí nechte místo vyschnout.
- Před injekcí se nedotýkejte očištěného místa.

Injekce:

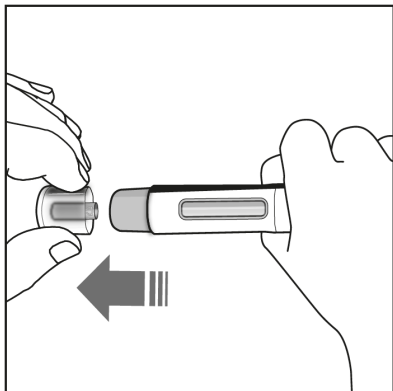


4. Sejmutí uzávěru:

- Uzávěr sejměte teprve tehdy, pokud jste připraven(a) použít pero.
- Stáhněte uzávěr rovně ve směru šipky, která je znázorněna na obrázku vlevo.
- Po sejmutí odhod'te uzávěr do odpadu. Nesnažte se uzávěr znovu nasadit.
- Pero použijte během 5 minut od sejmutí uzávěru.

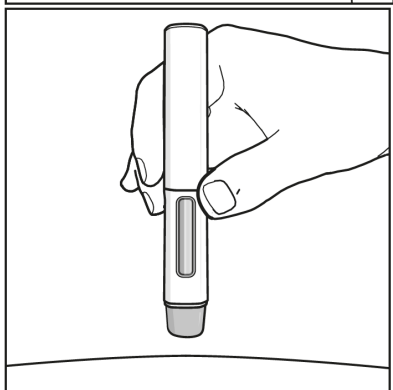


5. Držte pero:

- Držte pero pod úhlem 90 stupňů nad očištěným místem injekce.

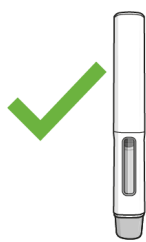

Správně

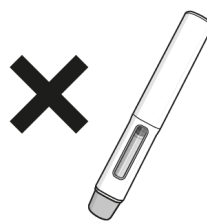

Špatně




PŘEČTĚTE SI PŘED PODÁNÍM INJEKCE.

Během injekce uslyšíte **2 cvaknutí**.


První cvaknutí znamená, že injekce začala. O několik vteřin později **druhé cvaknutí** znamená, že injekce je **téměř** podána.

Musíte držet pero pevně proti pokožce, dokud nevidíte, že **zelený indikátor se šedou špičkou** vyplnil okénko a přestal se pohybovat.

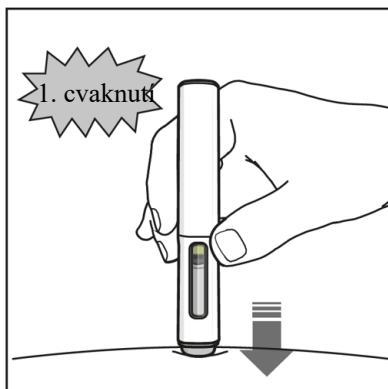

6. Zahájení injekce:


- Přitiskněte pero pevně proti pokožce, abyste zahájil(a) injekci.
- **První cvaknutí** znamená, že injekce začala.
- **Držte stále** pero pevně proti pokožce. **Zelený indikátor se šedou špičkou** ukazuje postup injekce.

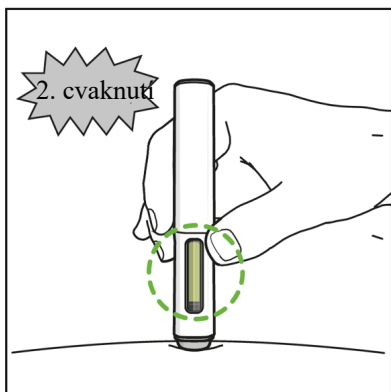

7. Ukončení injekce:


- Uslyšíte **druhé cvaknutí**. To znamená, že injekce je **téměř** podána.
- Zkontrolujte, zda **zelený indikátor se šedou špičkou** vyplnil okénko a přestal se pohybovat.
- Pero lze nyní vyjmout.

Po injekci:

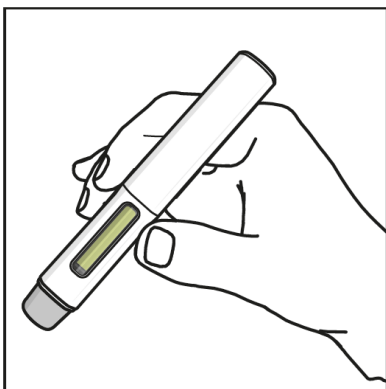

8. Zkontrolujte, zda zelený indikátor vyplnil okénko:

- To znamená, že přípravek byl podán. Pokud zelený indikátor není vidět, obraťte se na lékaře.
- Na místě injekce se může objevit malé množství krve. Můžete na místo injekce přitisknout smotek vaty nebo gázu a podržte 10 vteřin. Místa injekce se nedotýkejte. Pokud je to zapotřebí, můžete místo injekce překrýt malou adhezivní náplastí.

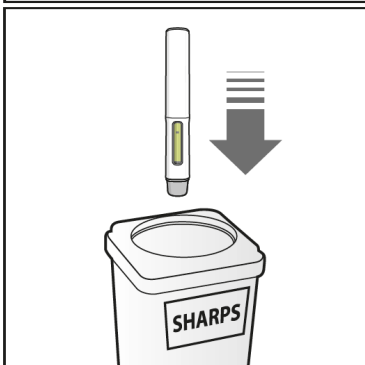

9. Odstranění pera Cosentyx UnoReady 300 mg:

- Odložte použité pero do nádoby na ostrý odpad (tj. proti propíchnutí odolná uzavíratelná schránka nebo podobná)
- Pero se nikdy nesnažte opakovaně použít.