

Cosentyx® 150 mg SensoReady® pen-süstli kasutusjuhend



Cosentyx 150 mg SensoReady pen-süstel

Süstelahus pen-süstlis

Sekukinumab

Patsiendi kasutusjuhend




Enne süstimist lugege läbi KOGU kasutusjuhend.

Need juhendid on mõeldud abistamaks teid õigesti süstima kasutades Cosentyx SensoReady pen-süstlit.

On oluline, et te ei prooviks ennast või oma hoolealust süstida enne, kui teid on õpetanud arst, meditsiiniõde või apteeker.

Teie Cosentyx 150 mg SensoReady pen-süstel:

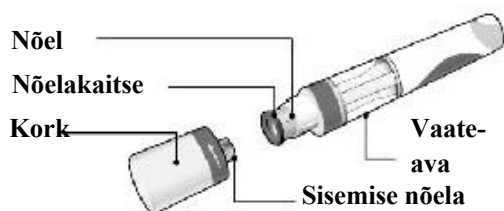

Cosentyx 150 mg SensoReady pen-süstel eemaldatud korgiga. Korki **mitte** eemaldada enne, kui olete valmis süstima.

Pen-süstel hoida karbis ja **külmkapis** temperatuurivahemikus 2 °C ja 8 °C ning **lastele kättesaamatus kohas**.


- Pen-süstlit **mitte** lasta külmuda.
- Pen-süstlit **mitte** loksutada.
- Pen-süstlit mitte kasutada, kui see **kukkus** maha ilma korgita.

Mugavamaks süstimiseks võtke pen-süstel külmkapist välja **15...30 minutit enne süstimist**, et lasta sel soojeneda toatemperatuurini.

Mida on süstimiseks vaja:

Karbis on:

Uus ja kasutamata Cosentyx 150 mg SensoReady pen-süstel (150 mg annuse jaoks on vaja 1 pen-süstlit ja 300 mg annuse jaoks on vaja 2 pen-süstlit).

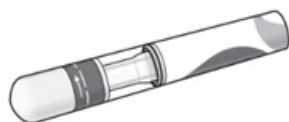

Karbis ei ole:


- Alkoholitampoon.
- Vatitampoon või side.
- Teravate esemete konteiner.



Enne süstimist:

1. Oluline ohutuse kontroll enne süstimist:

Vedelik peab olema selge. Värvus võib varieeruda värvitust kergelt kollakani.

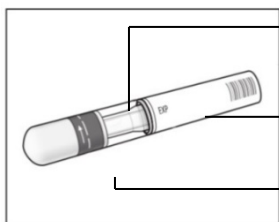


Ärge kasutage, kui vedelik sisaldab silmaga nähtavaid osakesi, on hägune või tajutavalt pruunikas. Võite näha väikest õhumulli, mis on normaalne.

Ärge kasutage pen-süstlit pärast **kõlblikkusaja** möödumist.


Ärge kasutage, kui **ohutussulgur** on katki.

Võtke ühendust oma apteekriga, kui pen-süstel ei vasta mis tahes loetletud punktidele.

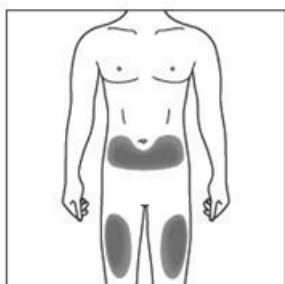

2a. Valige süstekoht:

- Soovitatav süstekoht on reie esiküljel. Võite kasutada ka alakõhtu, kuid **mitte** alal, mis on lähemal kui 5 sentimeetrit nabast.
- Süste tegemiseks valige iga kord erinev koht.
- Ärge süstige piirkonda, mille nahk on tundlik, esineb verevalum, punetus, ketendus või on kõva. Vältige armide või venitusarmidega piirkondi.

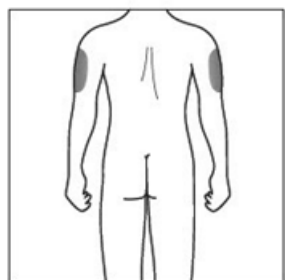

2b. Ainult hooldajatele ja tervishoiutöötajatele:


- Kui teile teeb süste **hooldaja** või **tervishoiutöötaja**, võib kasutada ka õlavarre ülemist osa.



3. Süstekoha puhastamine:

- Peske käsi seebi ja veega.
- Ringjate liigutustega puhastage süstekoht alkoholitampooniga. Enne süstimist laske süstekohal kuivada.
- Enne süstimist ärge puudutage puhastatud piirkonda.

Süstimine:

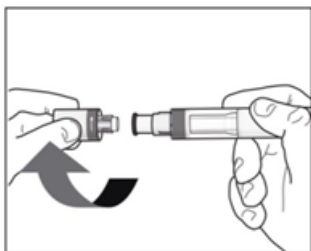


4. Korgi eemaldamine:

- Eemaldage kork ainult siis, kui te olete kohe valmis kasutama pen-süstlit.
- Keerake kork ära nooltega näidatud suunas.
- Pärast eemaldamist, visake kork ära. **Ärge proovige korki uuesti tagasi panna.**
- Pärast korki eemaldamist, kasutage pen-süstlit 5 minuti jooksul.



5. Pen-süstli hoidmine:

- Hoidke pen-süstlit süstekohas 90-kraadise nurga all.

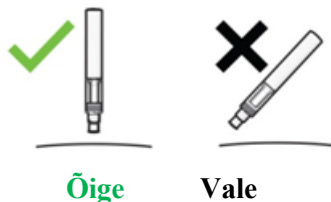

Öige

Vale




SEDA PEATE LUGEMA ENNE SÜSTIMIST .

Süstimise ajal kuulete **2 valjut plõksatust**.


- 1. plõksatus** näitab, et süstimine on alanud. Mitme sekundi pärast näitab
- 2. plõksatus**, et süstimine on **peaaegu** lõppenud.

Pen-süstlit peate hoidma tugevalt naha vastas, kuni **roheline märk** täidab vaateava ning enam ei liigu.

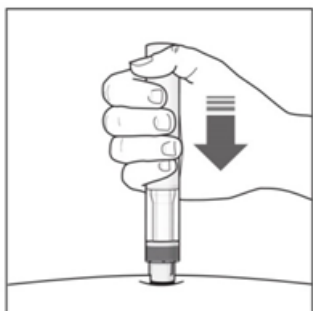

6. Süstimise alustamine:

- Suruge pen-süstel tugevalt vastu nahka, et alustada süstimist.
- 1. plõksatus** näitab, et süstimine on alanud.
- Hoidke** pen-süstlit tugevalt vastu nahka.
- Roheline märk** näitab süstimise kulgu.

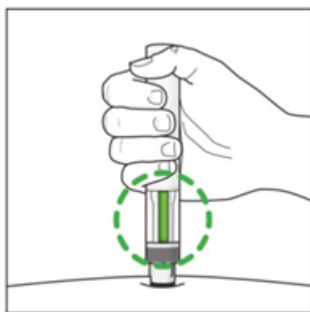

7. Süstimise lõpp:


- Kuuldes **2. plõksatust**, näitab see, et süstimine on **peaaegu** lõppenud.
- Kontrollige, kas **roheline märk** täidab vaateava ning enam ei liigu.
- Pen-süstli võib nüüd eemaldada.

Pärast süstimist:



8. Kontrollige, kas roheline märk täidab vaateava:

- See tähendab, et ravim on manustatud. Pöörduge arsti poole, kui rohelist märki ei ole näha.
- Süstekohal võib olla väikene kogus verd. Võite suruda süstekohale vatitampooni või sideme ning hoida seda 10 sekundit. Ärge hõõruge süstekohta. Kui vaja, võite süstekohta katta väikese plaastriga.

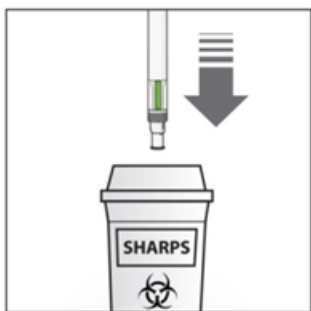

9. Cosentyx SensoReady pen-süstli ära viskamine:

- Visake kasutatud pen-süstel teravate esemete konteinerisse (s.o suletav torkekindel konteiner või selle sarnane).
- Ärge kunagi proovige uuesti kasutada pen-süstlit.