

Alkalmazási utasítás a Cosentyx 150 mg SensoReady injekciós tollhoz



Cosentyx 150 mg SensoReady injekciós toll

Oldatos injekció előretöltött injekciós tollban

Szekukinumab

Betegeknek szóló alkalmazási utasítás



Az injekció beadás előtt olvassa el elejétől a végéig ezeket az utasításokat.

Ezek az utasítások segítik Önt, hogy a Cosentyx SensoReady injekciós tollat helyesen alkalmazva adja be az injekciót.

Fontos, hogy ne próbálja meg saját magának vagy az Ön által gondozott személynek beadni az injekciót, amíg nem tanította meg arra a kezelőorvosa, a gondozását végző egészségügyi szakember vagy a gyógyszerész.

A Cosentyx 150 mg SensoReady injekciós toll:



A képen a Cosentyx 150 mg SensoReady injekciós toll levett kupakkal látható. **Ne** vegye le a kupakot, amíg fel nem készült az injekció beadására!

Tartsa a dobozban lévő injekciós tollat **hűtőszekrényben, 2 °C és 8 °C között, gyermekektől elzárva.**

- Az injekciós toll **nem fagyasztható!**
- **Ne rázza** az injekciós tollat!
- Ne alkalmazza az injekciós tollat, ha az a kupak levétele után **leesett!**

Az injekció kevésbé kellemetlen beadása érdekében **15-30 perccel az injekció beadása előtt** vegye ki az injekciós tollat a hűtőszekrényből, hogy az szobahőmérsékletűre melegedhessen.

Mire van szüksége az injekció beadásához?


Megtalálható a kartondobozban:

Egy új és még nem használt Cosentyx 150 mg SensoReady injekciós toll (a 150 mg-os adaghoz 1 db, a 300 mg-os adaghoz 2 db injekciós tollra van szükség).

Nincs benne a kartondobozban:

- Alkoholos törlő.
- Vattacsomó vagy géz.
- Éles eszközök eldobására szolgáló tartály.




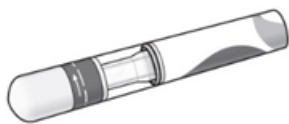

Az injekció beadása előtt:

1. Ellenőrizendő fontos biztonsági szempontok az injekció beadása előtt:

A folyadéknak tisztának kell lennie. A színe a színtelentől az enyhén sárgáig változhat.

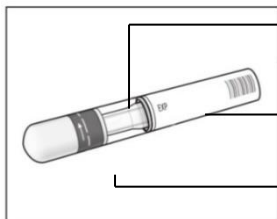


Ne alkalmazza, ha a folyadék minden kétséget kizáróan látható részecskéket tartalmaz vagy zavaros, vagy egyértelműen barna. Egy kis légbuborékot is láthat, ami normális.

Ne alkalmazza az injekciós tollat, ha a **lejárati idő** elmúlt.


Ne alkalmazza, ha a **biztonsági zárás** sérült.

Keresse fel gyógyszerészét, ha a fenti ellenőrzés során az injekciós toll bármilyen eltérést mutat.

2a. Válassza ki az injekció beadási helyét:

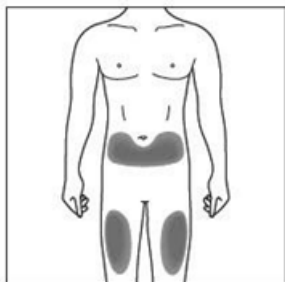

- A javasolt hely a combok elülső felszíne. Használhatja erre az alhas területét is, a köldök körüli 5 cm-es terület **kivételével**.
- Minden alkalommal, amikor bead egy injekciót saját magának, válasszon egy másik helyet.
- Ne adja be az injekciót olyan helyre, ahol a bőr érzékeny, bevértet, vörös, hámlik vagy kemény. Kerülje azokat a területeket, ahol hegek vagy terhességi csíkok vannak.

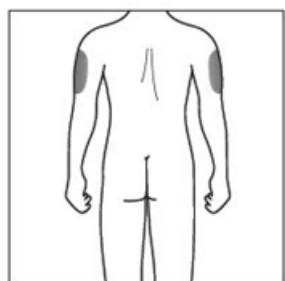

2b. Kizárólag gondozóknak és egészségügyi szakembereknek:


- Ha egy **gondozó** vagy egy **egészségügyi szakember** adja be Önnek az injekcióját, ők beadhatják azt a felkarja külső oldalába is.



3. Az injekció beadási helyének megtisztítása:

- Szappannal és meleg vízzel mosson kezet.
- Körkörös mozdulatokkal egy alkoholos törlővel tisztítsa meg az injekció beadási helyét. Az injekció beadása előtt hagyja, hogy megszáradjon.
- Az injekció beadása előtt ne érintse meg újra a megtisztított területet.

Az injekciója:

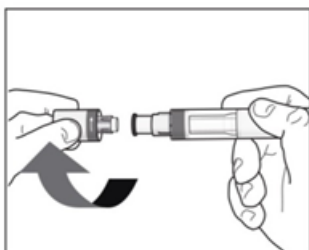

4. A kupak levétele:

- Csak akkor vegye le a kupakot, ha felkészült az injekciós toll alkalmazására.
- A nyílak irányába csavarja le a kupakot.
- Ha levette, dobja el a kupakot. **Ne próbálja meg visszarakni a kupakot!**
- A kupak levétele után 5 percen belül használja fel az injekciós tollat.



5. Fogja meg az injekciós tollát:

- Tartsa az injekciós tollat 90 fokos szögben az injekció megtisztított beadási helyéhez.



Helyes



Helytelen




AZ INJEKCIÓ BEADÁSA ELŐTT EZT EL KELL OLVASSA!

Az injekció beadása alatt **2 hangos kattánást** fog hallani.


Az **első kattánás** azt jelzi, hogy az injekció beadása elkezdődött. Néhány másodperccel később a **második kattánás** azt jelzi majd, hogy az injekció beadása **majdnem** befejeződött.

Erősen a bőréhez nyomva kell tartsa az injekciós tollat, amíg azt nem látja, hogy egy **zöld jelzés** kitölti az ellenőrző ablakot, és abbahagyja a mozgást.

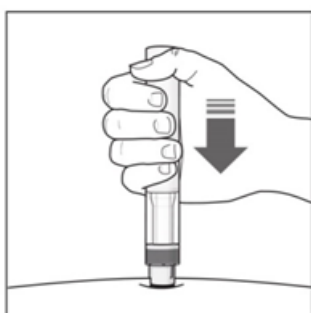

6. Az injekció beadásának elkezdése:

- Az injekció beadásának elkezdéséhez nyomja erősen a bőréhez az injekciós tollat.
- Az **első kattánás** azt jelzi, hogy az injekció beadása elkezdődött.
- Tartsa erősen a bőréhez nyomva az injekciós tollat.
- A **zöld jelzés** azt mutatja, hogy az injekció beadása folyamatban van.

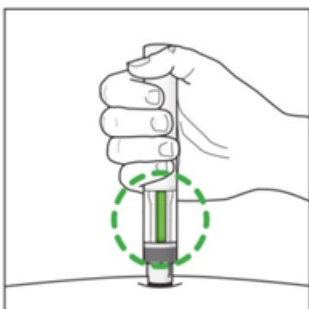

7. Az injekció beadásának befejezése:


- Hallgassa a **második kattánást**. Ez azt jelzi, hogy az injekció beadása **majdnem** befejeződött.
- Ellenőrizze le, hogy a **zöld jelzés** kitölti az ellenőrző ablakot, és abbahagyta a mozgást.
- Az injekciós toll most elvehető a bőrről.

Az injekció beadása után:



8. Ellenőrizze, hogy a zöld jelzés kitölti az ellenőrző nyílást:

- Ez azt jelenti, hogy beadta a gyógyszert. Forduljon kezelőorvosához, ha a zöld jelzés nem látható!
- Lehet egy kis mennyiségű vér az injekció beadási helyén. Ránymhat egy vattagombócot vagy gézt az injekció beadási helyére, és tartsa ott 10 másodpercig. Ne dörzsölje az injekció beadási helyét. Szükség esetén lefedheti az injekció beadási helyét egy öntapadó kötszerrel.

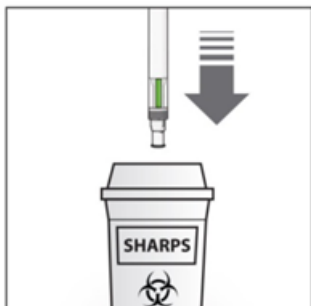

9. A Cosentyx SensoReady injekciós toll megsemmisítése:

- A használt injekciós tollat dobja egy éles eszközök tárolására szolgáló tartályba (azaz egy nem átszűrhető falú, zárható tartályba, vagy valami hasonlóba).
- Soha ne próbálja meg újra használni az injekciós tollát!