

Istruzioni per l'uso di Cosentyx 150 mg penna SensoReady



Cosentyx penna SensoReady di 150 mg

Soluzione iniettabile in penna preriempita

Secukinumab

Istruzioni per l'uso per il paziente




Leggere INTERAMENTE queste istruzioni prima di effettuare l'iniezione.

Queste istruzioni sono un aiuto per praticare correttamente l'iniezione mediante l'uso della penna SensoReady di Cosentyx.

È importante non tentare di effettuare l'iniezione da soli o da una persona che fornisce assistenza finché non si saranno ricevute adeguate istruzioni dal medico, dall'infermiere o dal farmacista.

Aspetto della penna SensoReady di Cosentyx di 150 mg:

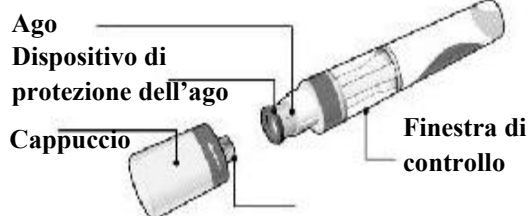

Penna SensoReady di Cosentyx di 150 mg mostrata con il cappuccio rimosso. **Non** rimuovere il cappuccio fino a quando non è pronto per l'iniezione.

Conservare la penna confezionata in **frigorifero** tra 2°C e 8°C e tenerla **fuori dalla portata dei bambini**.


- **Non congelare** la penna.
- **Non agitare** la penna.
- Non usare la penna se è stata **fatta cadere** senza cappuccio.

Per un'iniezione più confortevole, tolga la penna dal frigorifero **15-30 minuti prima dell'iniezione** per consentire di raggiungere la temperatura ambiente.

Cosa necessita per l'iniezione:

Incluso nella confezione:

penna SensoReady di Cosentyx di 150 mg nuova e non usata (per una dose di 150 mg è necessaria 1 penna e per una dose di 300 mg sono necessarie 2 penne).

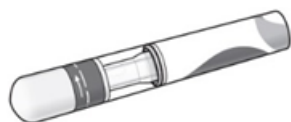

Non incluso nella confezione:


- tamponi imbevuti di alcool.
- batuffolo di cotone o garza.
- contenitore per lo smaltimento di materiali taglienti.



Prima dell'iniezione:

1. Importanti controlli di sicurezza prima dell'iniezione:

Il liquido deve essere limpido. Il colore può variare da incolore a leggermente giallo.

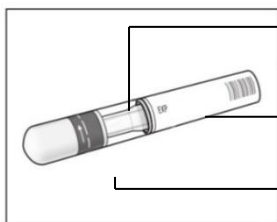


Non usare se il liquido contiene particelle facilmente visibili, è torbido o è chiaramente marrone. Potrebbero essere visibili delle piccole bolle d'aria, il che è normale.

Non usare la penna dopo la **data di scadenza**.


Non usare se il **sigillo di sicurezza** è stato aperto.

Contattare il farmacista se la penna non soddisfa uno qualsiasi di questi controlli.

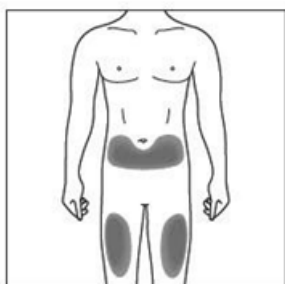

2a. Scelta della sede di iniezione

- La sede raccomandata è la parte anteriore delle cosce. Può anche usare il basso addome, ma **non** l'area di 5 centimetri intorno all'ombelico.
- Scegliere una sede differente per ogni nuova iniezione.
- Non iniettare in aree dove la pelle è sensibile, sono presenti lividi, è arrossata, desquamata o indurita. Evitare le aree dove sono presenti cicatrici o smagliature.

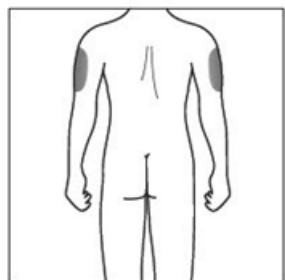

2b. Solo per le persone che si occupano del paziente e gli operatori sanitari


- Se l'iniezione le viene somministrata **da una persona che la assiste** o **dagli operatori sanitari**, può essere effettuata anche nella parte superiore esterna delle braccia.



3. Pulizia della sede di iniezione

- Lavarsi le mani con sapone e acqua calda.
- Con un movimento circolare, pulire la sede di iniezione con un tampone imbevuto di alcool. Lasciare asciugare prima di effettuare l'iniezione.
- Non toccare di nuovo l'area pulita prima di effettuare l'iniezione.

Iniezione

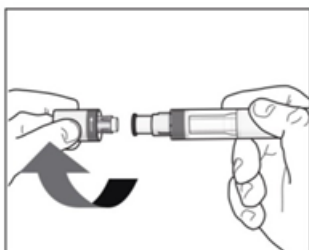

4. Rimozione del cappuccio

- Rimuovere il cappuccio solo quando si è pronti per l'uso della penna.
- Svitare il cappuccio nella direzione delle frecce.
- Una volta che è stato rimosso, gettare il cappuccio. **Non tentare di rimettere il cappuccio.**
- Usare la penna entro 5 minuti dalla rimozione del cappuccio.



5. Posizione della penna

- Tenere la penna a 90 gradi rispetto alla sede di iniezione pulita.



Corretto



Non corretto




DA LEGGERE PRIMA DI ESEGUIRE L'INIEZIONE.

Durante l'iniezione sentirà **2 click sonori**.


Il **primo click** indica che l'iniezione è iniziata. Diversi secondi più tardi un **secondo click** indicherà che l'iniezione è **quasi** completata.

Deve continuare a tenere saldamente la penna contro la pelle fino a quando non vedrà un **indicatore verde** riempire la finestra e interrompere il suo movimento.

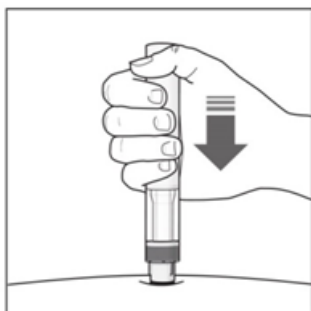

6. Iniziare l'iniezione


- Premere con fermezza la penna contro la pelle per iniziare l'iniezione.
- Il **primo click** indica che l'iniezione è iniziata.
- **Continuare a mantenere** la penna con fermezza contro la pelle.
- L'**indicatore verde** mostra lo stato di avanzamento dell'iniezione.

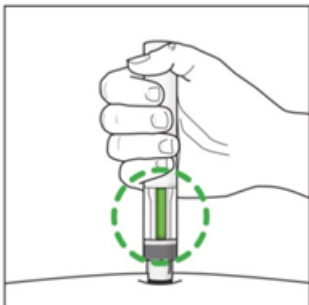

7. Completare l'iniezione


- Attendere il suono del **secondo click**. Questo indica che l'iniezione è **quasi** completata.
- Controllare che l'**indicatore verde** riempi la finestra e si sia fermato.
- La penna può essere ora rimossa.

Dopo l'iniezione

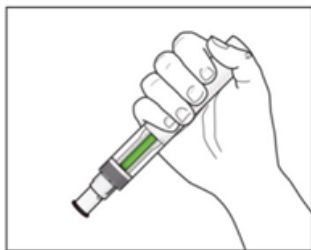

8. Controllare che l'indicatore verde riempia la finestra

- Questo significa che il medicinale è stato somministrato. Contattare il medico se l'indicatore verde non è visibile.
- Potrebbe verificarsi un leggero sanguinamento nella sede dell'iniezione. In tal caso si può premere un batuffolo di cotone o una garza sulla sede dell'iniezione e tenerlo per 10 secondi. Non strofinare la sede di iniezione. Se necessario è possibile coprire la sede dell'iniezione con un piccolo cerotto.

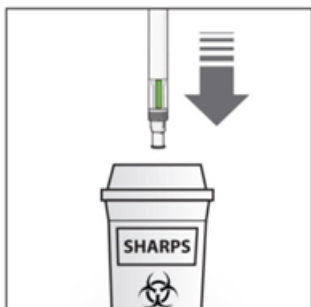

9. Smaltire la penna SensoReady di Cosentyx

- Smaltire la penna utilizzata riponendola in un apposito contenitore per materiale tagliente (es. un contenitore richiudibile, resistente alle forature o similari).
- Non tentare mai di riutilizzare la penna.