

Norādījumi par Cosentyx® 150 mg SensoReady pildspalvveida pilnšļirces lietošanu



Cosentyx SensoReady 150 mg pildspalvveida pilnšļirce

Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Sekukinumabs

Lietošanas instrukcija pacientam



Pirms injekcijas izlasiet VISUS turpmākos norādījumus.

Šie norādījumi Jums palīdzēs pareizi lietot Cosentyx SensoReady pildspalvveida pilnšļirci.

Ir svarīgi nemēģināt injicēt pašam, pirms Jūs vai Jūsu aprūpē esošo personu nav apmācījis ārsts, medmāsa vai farmaceits.

Jūsu Cosentyx 150 mg SensoReady pildspalvveida pilnšļirce



Cosentyx 150 mg SensoReady pildspalvveida pilnšļirce attēlota ar noņemtu vāciņu. **Nenoņemiet** vāciņu, pirms neesat sagatavojies injekcijai.

Uzglabāt iepakoto pildspalvveida pilnšļirci **ledusskapī** (2°C–8°C temperatūrā) **bērniem nepieejamā vietā**.

- Pildspalvveida pilnšļirci **nedrīkst sasaldēt**.
- Pildspalvveida pilnšļirci **nedrīkst kratīt**.
- Nelietot pildspalvveida pilnšļirci, ja tā **nokritusi** ar noņemtu vāciņu.

Lai injekcija ar pildspalvveida pilnšļirci nebūtu pārāk nepatīkama, pilnšļirce **pirms injekcijas uz 15–30 minūtēm** jāizņem no ledusskapja, lai tā sasniegtu istabas temperatūru.

Injicēšanas laikā nepieciešamais

Iekļauts iepakojumā:

Jauna nelietota Cosentyx 150 mg SensoReady pildspalvveida pilnšļirce (150 mg ievadišanai jāņem viena pildspalvveida pilnšļirce un 300 mg ievadišanai jāņem divas pildspalvveida

Nav iekļauts iepakojumā:

- spirta tampons;
- vates tampons vai marle un
- trauks asu priekšmetu izmešanai.


pilnšļirces).



Pirms injekcijas

1. Svarīgas drošības pārbaudes pirms injekcijas

Šķidrumam jābūt caurspīdīgam. Tas var būt bezkrāsains vai viegli iedzeltens.

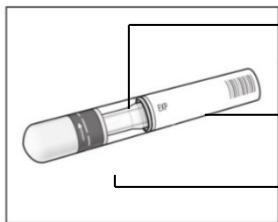


Nelietojiet šķīdumu, ja tajā ir labi saredzamas daļiņas vai tas ir duļķains vai izteikti brūns. Jūs varat saskatīt sīkus gaisa burbulīšus, un tas ir normāli.

Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci, ja beidzies tās **derīguma termiņš**.


Nelietojiet, ja ir bojāts **drošības noslēgs**.

Ja pildspalvveida pilnšļirce neiztur kādu no šīm pārbaudēm, sazinieties ar savu farmaceitu.

2a. Izvēlieties injekcijas vietu

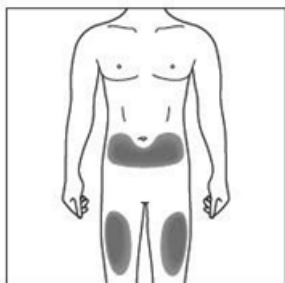

- Ieteicamā vieta ir augšstilbu priekšējā daļa. Jūs varat injicēt arī vēdera lejasdaļā, bet **ne** piecu centimetru rādiusā ap nabu.
- Katrai injekcijai vienmēr jāizvēlas cita vieta.
- Nedrīkst injicēt zonā, kur āda ir jutīga, ar zilumiem, apsarkusi, zvīņaina vai sacietējusi. Jāizvairās injicēt zonās ar rētām vai strijām.

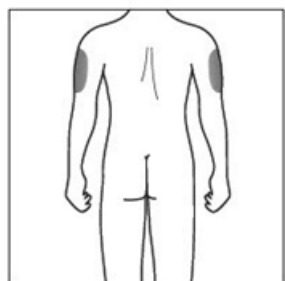

2b. Tikai aprūpētājiem un veselības aprūpes speciālistiem


- Ja injekciju izdara **aprūpētājs** vai **veselības aprūpes speciālists**, injicēt drīkst arī augšdelma ārējā daļā.



3. Injekcijas vietas tīrīšana

- Ar ziepēm un ūdeni nomazgājiet rokas.
- Izmantojot spirta tamponu, ar riņķveida kustībām notīriet injekcijas vietu. Pirms injekcijas ļaujiet tai nožūt.
- Pirms injekcijas nepieskarieties notīrītajai vietai.

Injekcija

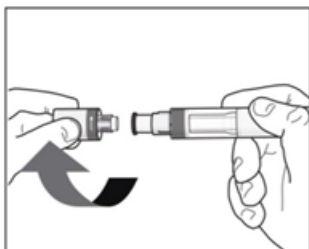

4. Vāciņa noņemšana

- Noņemiet vāciņu tikai tad, kad esat sagatavojies pildspalvveida pilnšļirces lietošanai.
- Pagrieziet vāciņu bultiņu norādītajā virzienā.
- Vāciņš pēc noņemšanas jāizmet. **Nemēģiniet likt vāciņu atpakaļ.**
- Pildspalvveida pilnšļirce jāizlieto piecu minūšu laikā pēc vāciņa noņemšanas.



5. Kā turēt pildspalvveida pilnšļirci

- Pildspalvveida pilnšļirce jātur 90 grādu leņķī pret injekcijas vietu.



Pareizi **Nepareizi**




IZLASĪT PIRMS INJICĒŠANAS.

Injekcijas laikā būs dzirdami **divi skaļi klikšķi**.


Pirmais klikšķis norāda, ka injekcija ir sākusies. Pēc vairākām sekundēm dzirdamais **otrais klikšķis** norādīs, ka injekcija ir **gandrīz** beigusies.

Pildspalvveida pilnšļirci jāturpina stingri turēt, līdz **zaļais indikators** ir aizpildījis lodziņu un apstājies.

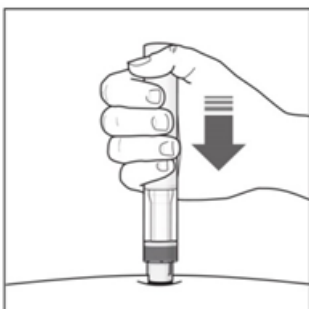

6. Injekcijas sākšana


- Stingri piespiediet pildspalvveida pilnšļirci pie ādas, lai sāktu injekciju.
- **Pirmais klikšķis** norāda, ka injekcija ir sākusies.
- **Turpiniet turēt** pildspalvveida pilnšļirci stingri pret ādu.
- **Zaļais indikators** parāda injekcijas gaitu.

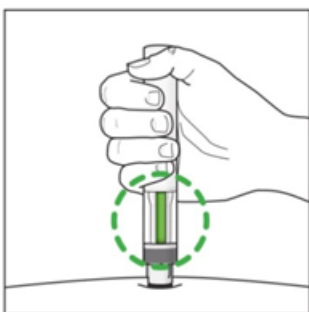

7. Injekcijas pabeigšana


- Saklausiet **otro klikšķi**. Tas norāda, ka injekcija ir **gandrīz** pabeigta.
- Pārbaudiet, vai **zaļais indikators** ir aizpildījis lodziņu un apstājies.
- Tagad pildspalvveida pilnšļirci var izvilkt no ādas.

Pēc injekcijas

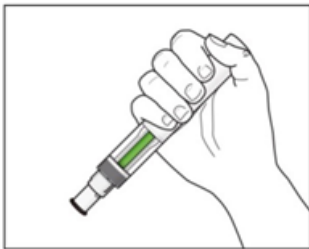

8. Pārbaudiet, vai zaļais indikators ir aizpildījis lodziņu

- Tas nozīmē, ka visas zāles ir ievadītas. Ja zaļais indikators nav redzams, sazinieties ar savu ārstu.
- Injekcijas vietā ir iespējama viegla asiņošana. Injekcijas vietai 10 sekundes var piespiest vates piciņu vai marli. Neberzējiet injekcijas vietu. Injekcijas vietu varat pārklāt ar nelielu plāksteri, ja tas nepieciešams.

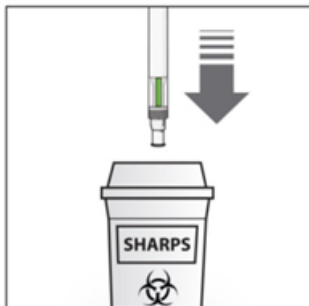

9. Kā izmest Cosentyx SensoReady pildspalvveida pilnšļirci

- Pildspalvveida pilnšļirce jāizmet asu priekšmetu izmešanai domātā traukā (piemēram, necaurduramā noslēdzamā traukā u.tml.).
- Nekādā gadījumā nemēģiniet pildspalvveida pilnšļirci lietot atkārtoti.