

Tagħrif dwar kif tuża l-pinna Cosentyx tal-150 mg SensoReady



Il-pinna Cosentyx tal-150 mg SensoReady

Soluzzjoni għall-injezzjoni, f'pinna mimlija għal-lest

Secukinumab

Tagħrif dwar l-użu għall-pazjent




Jekk jogħġbok aqra dawn l-istruzzjonijiet KOLLHA qabel l-injezzjoni.

Dawn l-istruzzjonijiet jgħinuk tinjetta l-medicina sew billi tuża l-pinna Cosentyx SensoReady.

Importanti li ma tippruvax tinjetta lilek innifsek jew lill-persuna li qed tikkuraha sakemm ma tkunx tharriġt mit-tabib, mill-infermier jew mill-ispizjar tiegħek.

Il-pinna Cosentyx tal-150 mg SensoReady tiegħek

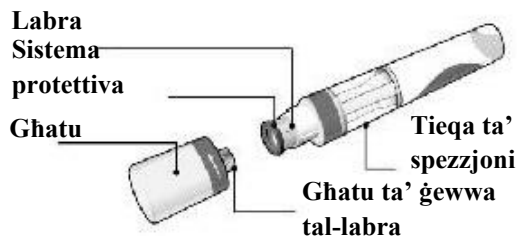

Il-pinna Cosentyx tal-150 mg SensoReady murija bl-għatu mneħhi. **Tneħħix** l-għatu qabel ma tkun lest biex tinjetta l-medicina.

Ahżen il-kaxxa bil-pinna fi friġġ f'temperatura bejn 2°C u 8°C u **thallihex fejn jistghu jilhquha t-tfal.**


- **Tiffriżax** il-pinna.
- **Thawwadx** il-pinna.
- Tużax il-pinna jekk **twaqqgħet** u kienet bla għatu.

Sabiex tinjetta s-soluzzjoni b'aktar kumdità, oħroġ il-pinna mill-friġġ **15-30 minuta qabel l-injezzjoni** biex taġtiha ċans tilhaq it-temperatura tal-kamra.

X'għandek b'żonn għall-injezzjoni tiegħek:

Inkluż fil-pakkett:

Pinna Cosentyx tal-150 mg SensoReady ġdida u mhux użata (meħtieġa pinna waħda għal doża ta' 150 mg u huma meħtieġa 2 pinen għal doża ta' 300 mg).

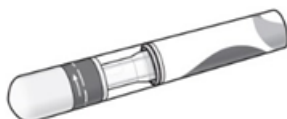

Mhux inklużi fil-pakkett:


- Tadjara bl-alkoħol.
- Biċċa tadjara jew garża.
- Kontenitur li fih jintremgħu oġġetti bil-ponta jew li jaqtgħu.



Qabel l-injezzjoni:

1. Aspetti ta' sigurtà importanti qabel ma tiehu l-injezzjoni:

Il-likwidu għandu jkun ċar. Il-kulur tiegħu jista' jvarja minn bla kulur għal ħarira fl-isfar.

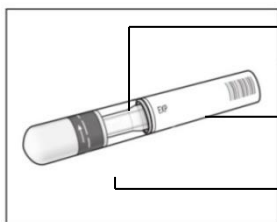


Tużax jekk il-likwidu fih biċċiet li jidhru b'mod ċar, huwa mċajpar jew jidher b'mod ċar li hu kannella. Tista' tilmaħ bużżeġa żgħira tal-arja, li hu normali.

Tużax il-pinna jekk **id-data ta' meta tiskadi** għaddiet.


Tużax jekk is-sigill ta' sigurtà nkiser.

Kellem lill-ispizjar tiegħek jekk il-pinna ma tilhaqx xi wieħed minn dawn l-aspetti ta' sigurtà.

2a. Aghżel il-post tal-injezzjoni:

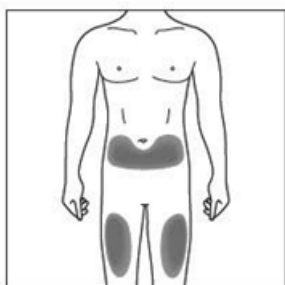

- Il-post irrakkomandat hu l-parti ta' quddiem tal-koxox. Tista' tuża wkoll in-naħa ta' isfel ta' żaqkek, imma **mhux** l-erja ta' 5 ċentimetri madwar iż-żokra.
- Aghżel post differenti kull darba li tagħti l-injezzjoni lilek innifsek.
- Tinjettax il-medicina f'żoni fejn il-ġilda hi sensitiva, imbenġla, ħamra, bil-qxur jew iebsa. Evita żoni b'ċikatrici jew bi *stretch marks*.

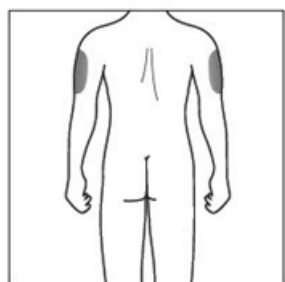

2b. Persuni ohrajn u professjonisti fil-qasam mediku biss:


- Jekk din l-injezzjoni qed tagħtihielek **persuna ohra** jew **professjonist fil-qasam mediku**, jistgħu jtaqqbuk ukoll fin-naħa ta' barra tal-parti ta' fuq ta' dirgħajk.



3. Naddaf il-post tal-injezzjoni:

- Aħsel idejk bis-sapun u l-ilma sħun.
- Naddaf il-post tal-injezzjoni b'tajjara bl-alkoħol permezz ta' moviment ċirkolari. Ħallih jinxef qabel ma tinjetta l-medicina.
- Terġax tmiss il-parti mnaddfa qabel l-injezzjoni.

L-injezzjoni tieghek:

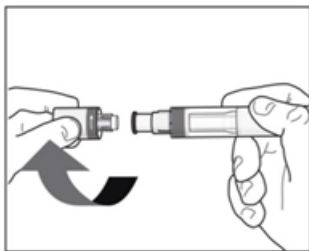

4. Nehhi l-ghatu:

- Nehhi l-ghatu biss meta tkun lest biex tuża l-pinna.
- Nehhi l-ghatu billi ddawwar fid-direzzjoni tal-vleġeġ.
- Ġaladarba taqla' l-ghatu, armih. **Tippruvax twahhal l-ghatu mill-ġdid.**
- Uża l-pinna fi żmien 5 minuti minn meta tneħhi l-ghatu.



5. Kif iżzomm il-pinna tieghek:

- Żomm il-pinna f'angolu ta' 90 grad mal-post innaddaf fejn se tagħti l-injezzjoni.



Tajjeb



Hażin




TRID TAQRA DAN QABEL L-INJEZZJONI.

Waqt l-injezzjoni se tisma' **2 hsejjes ifaqqghu.**


L-ewwel **hoss** juri li l-injezzjoni bdiet. Bosta sekondi wara se tisma' **t-tieni** **hoss** li jurik li l-injezzjoni **kwazi** lesta.

Għandek tibqa' iżzomm il-pinna sew mal-ġilda tieghek sakemm tara **indikatur aħdar** jimla t-tieqa u jieqaf jiċċaqilaq.

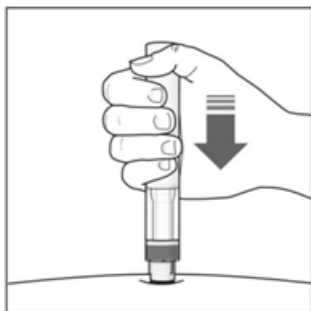

6. Kif tibda l-injezzjoni:


- Aghfas il-pinna sew mal-ġilda sabiex tibda l-injezzjoni.
- L-ewwel **hoss** juri li l-injezzjoni bdiet.
- **Ibqa'** żomm il-pinna sew mal-ġilda tieghek.
- L-**indikatur l-aħdar** juri l-progress tal-injezzjoni.

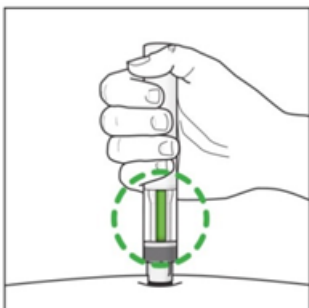

7. Kif tintemm l-injezzjoni:


- Isma' **t-tieni** **hoss**. Dan juri li l-injezzjoni **kwazi** lesta.
- Iċċekkja li l-**indikatur l-aħdar** mela t-tieqa u waqaf jiċċaqilaq.
- Il-pinna issa tista' titneħha.

Wara l-injezzjoni:

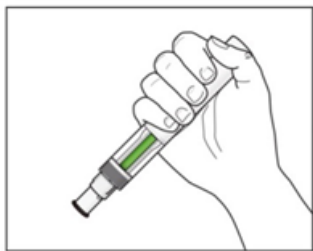

8. Iċċekkja li l-indikatur l-aħdar jimla t-tieqa:

- Dan ifisser li l-mediċina inghatat. Kellem lit-tabib tiegħek jekk l-indikatur aħdar ma jidherx.
- Jista' jkun hemm ammont żgħir ta' demm fil-post fejn ingħatajt l-injezzjoni. Tista' tagħfas biċċa tajjara jew garża fuq il-post tal-injezzjoni u żommha għal 10 sekondi. Togħroxx il-post fejn ittaqqabt. Tista' tghatti l-post fejn ittaqqabt bi stikk żgħir, jekk hemm bżonn.

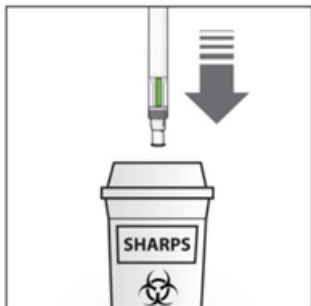

9. Kif tarmi l-pinna Cosentyx SensoReady tiegħek:

- Armi l-pinna użata f'kontenitur li fih jintremghu oġġetti bil-ponta jew li jaqtgħu (jigifieri kontenitur magħluq li ma jittaqqabx, jew simili).
- Qatt m'għandek terġa' tuża l-pinna.