

Navodila za uporabo injekcijskega peresnika SensoReady s 150 mg zdravila Cosentyx



Injekcijski peresnik SensoReady z zdravilom Cosentyx 150 mg

Raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku

Sekukinumab

Navodila za uporabo za bolnike




Pred injiciranjem preberite ta navodila V CELOTI.

Ta navodila vam bodo pomagala, da boste pri injiciranju zdravila Cosentyx pravilno uporabljali injekcijski peresnik SensoReady.

Pomembno je, da si ne poskušate zdravila injicirati sami oziroma ga ne poskušate injicirati osebi, za katero skrbite, dokler vas tega ne nauči zdravnik, medicinska sestra ali farmacevt.

Injekcijski peresnik SensoReady s 150 mg zdravila Cosentyx:

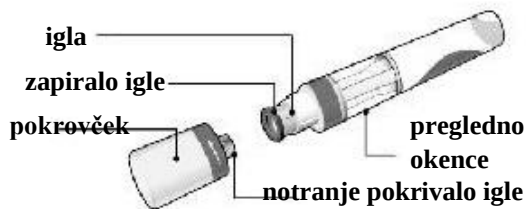

Prikaz injekcijskega peresnika SensoReady s 150 mg zdravila Cosentyx s snetim pokrovčkom. Pokrovček snemite šele **tik pred** injiciranjem.

Injekcijski peresnik shranjujte v škatli v **hladilniku** pri temperaturi od 2 °C do 8 °C in **otrokom nedosegljivo**.


- Injekcijskega peresnika **ne zamrzujte**.
- **Ne stresajte** injekcijskega peresnika.
- Če vam je injekcijski peresnik padel s snetim pokrovčkom, ga ne uporabite.

Da bo injiciranje manj neprijetno, vzemite injekcijski peresnik iz hladilnika **15-30 minut pred injiciranjem**, da se lahko ogreje na sobno temperaturo.

Kaj potrebujete pri injiciranju:

V škatli najdete:

nov in neuporabljen injekcijski peresnik SensoReady s 150 mg zdravila Cosentyx (za odmerek 150 mg potrebujete 1 injekcijski peresnik, za odmerek 300 mg pa potrebujete 2 injekcijska peresnika).

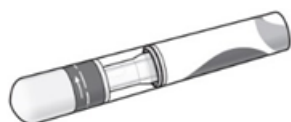

Pripomočki, ki niso priloženi:


- alkoholni zloženec
- kosem vate ali zloženec iz gaze
- zbiralnik za ostre predmete



Pred injiciranjem:

1. Kaj je treba preveriti pred injiciranjem:

Tekočina mora biti bistra, njena barva pa lahko variira od brezbarvne do nekoliko rumenkaste.

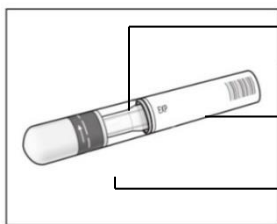


Tekočine **ne uporabljajte**, če vsebuje jasno vidne delce, če je motna ali izrazito rjave barve. Morda lahko vidite majhen zračni mehurček, kar je normalno.

Injekcijskega peresnika **ne uporabljajte**, če mu je potekel rok uporabnosti.


Zdravila **ne uporabljajte**, če injekcijski peresnik **ni originalno zaprt**.

Če pri opisanem pregledu ugotovite, da injekcijski peresnik ni ustrezen, se obrnite na farmacevta.

2a. Izberite mesto injiciranja:

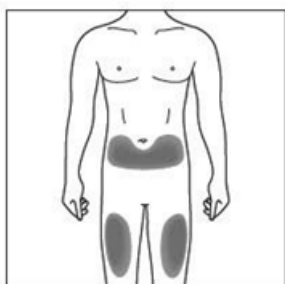

- Priporočeno mesto injiciranja je na sprednjem delu stegen. Zdravilo lahko injicirate tudi na spodnjem delu trebuha, vendar **ne** v predelu, oddaljenem 5 centimetrov ali manj od popka
- Vsakokrat, ko si injicirate zdravilo, izberite drugo mesto na koži.
- Zdravila ne injicirajte v predele, kjer je koža bolj občutljiva, podpluta, rdeča, luskasta ali trda. Prav tako se izogibajte predelom z brazgotinami ali strijami.

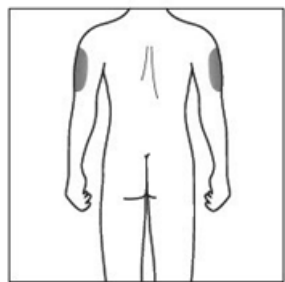

2b. Samo za negovalce in zdravstvene delavce:


- Če vam injekcijo daje **negovalec** ali **zdravstveni delavec**, lahko zdravilo injicira tudi na zunanji strani nadlakti.



3. Čiščenje mesta injiciranja:

- Roke si umijte z milom in vročo vodo.
- Uporabite alkoholni zloženec in s krožnimi gibi očistite mesto injiciranja. Pred injiciranjem naj se koža posuši.
- Pred injiciranjem se očiščenega mesta ne dotikajte več.

Injiciranje:

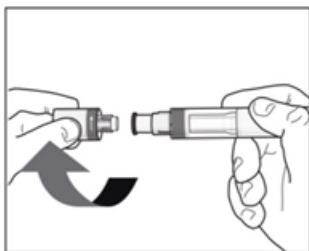

4. Snemanje pokrovčka:

- Pokrovček snemite šele takrat, ko boste pripravljeni za uporabo injekcijskega peresnika.
- Pokrovček zasukajte in potegnite v smeri puščice.
- Ko pokrovček odstranite, ga zavržite. **Ne poskušajte ga namestiti nazaj na injekcijski peresnik.**
- Po odstranitvi pokrovčka morate injekcijski peresnik uporabiti v roku 5 minut.



5. Kako držati injekcijski peresnik:

- Injekcijski peresnik držite pravokotno nad očiščenim mestom injiciranja (pod kotom 90 stopinj).



pravilno



nepravilno




TO MORATE PREBRATI PRED INJICIRANJEM

Med injiciranjem boste slišali **2 glasna klika**.


1. klik pomeni, da se je injiciranje začelo. Nekaj sekund kasneje boste slišali **2. klik**, ki pomeni, da je injiciranje **skoraj** končano.

Injekcijski peresnik še naprej močno pritiskajte v kožo, dokler **zeleni indikator** povsem ne zapolni okenca in se neha premikati.

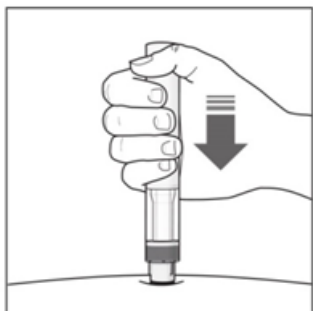

6. Začetek injiciranja:

- Injekcijski peresnik močno pritisnite proti koži, da se injiciranje lahko začne.
- **1. klik** pomeni, da se je injiciranje začelo.
- Injekcijski peresnik **še naprej močno pritiskajte** v kožo.
- **Zeleni indikator** kaže potek injiciranja.

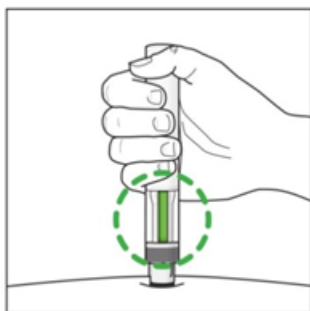

7. Zaključek injiciranja:


- Počakajte na **2. klik**. Ta pomeni, da je injiciranje **skoraj** končano.
- Opazujte, kdaj **zeleni indikator** zapolni okence in se neha premikati.
- Zdaj lahko injekcijski peresnik odstranite s kože.

Po injiciranju:



8. Preglejte, ali je zeleni indikator zapolnil okence:

- To pomeni, da je odmerek zdravila injiciran v celoti. Če zelenega indikatorja ni videti, obvestite zdravnika.
- Na mestu injiciranja se lahko pojavi nekaj krvi. Na to mesto lahko pritisnete kosem vate ali zloženec iz gaze in ga držite 10 sekund. Mesta injiciranja ne drgnite. Če je treba, ga lahko pokrijete z majhnim obližem.

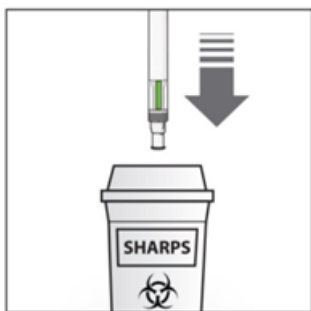

9. Odstranjevanje injekcijskega peresnika SensoReady z zdravilom Cosentyx:

- Uporabljen injekcijski peresnik odvrzite v zbiralnik za ostre predmete (torej v vsebnik iz materiala, ki ga ni mogoče prebosti, vsebnik pa je mogoče zapreti ali v podoben vsebnik).
- Že uporabljenega injekcijskega peresnika nikoli ne poskušajte ponovno uporabiti.